

Pansement israélien compressif d'urgence



Pansement compressif d'urgence pour intervenir rapidement et efficacement en cas d'hémorragie.

Très utilisé par les urgentistes lors des accidents graves qui impliquent plusieurs victimes.

Le pansement compressif assure une pression suffisante pour stopper le saignement hémorragique et remplace une compression manuelle.

Il comprime la plaie sans pour autant arrêter la circulation sanguine.

Applicable sur différentes parties du corps : bras, avant-bras, cuisse, etc

Facile à utiliser : il suffit d'appliquer la compresse au niveau de la blessure et d'enrouler la bande autour de la partie blessée en prenant soin de recouvrir la compresse. Passer la bande à travers l'applicateur de pression deux fois successives en passant par l'applicateur puis serrer. Effectuer un retour en arrière avec la bande pour recouvrir l'applicateur de pression et attacher la bande avec la barrette de fermeture.

Le pansement israélien possède l'avantage de pouvoir être posé par la victime elle-même.

A usage unique. Dispositif médical stérile.